

Alkoholfreie Flächendesinfektion

Medizid® AF+

Konzentrat zur Flächendesinfektion

Präparatetyp

Medizid® AF+ ist ein flüssiges, aldehyd- und alkoholfreies Konzentrat zur Desinfektion von alkoholunbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten, insbesondere Geräteoberflächen und Gegenständen im patientennahen Umfeld.

Anwendungsbereich

Ideal für Bereiche mit starker Verschmutzung und Geruchsbelastung wie z. B. OP-Tische, Bettgestelle und Flächen des medizinischen Inventars, die Industrie und öffentliche Einrichtungen. Auch für alkoholempfindliche Flächen geeignet. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen.

Anwendung


Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen; Oberflächen vollständig mit der Lösung benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienischen sauberen Einmaltuch verteilen, dabei die Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeiten beachten; Oberflächen vollständig benetzen; Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Dosierhilfen verwenden und Hinweise beachten; Anwendungsbeispiel: 10 L einer 1%igen Lösung = 9,9 L Wasser + 100 ml Medizid® AF+.

Haltbarkeit

Medizid® AF+ kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Die Mindesthaltbarkeit beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

Anwendung: Konz. / Einwirkzeit:

Wirksamkeiten gem. EN Normen und Richtlinien der VAH:	1 Min.	5 Min.	30 Min.	60 Min.
Bakterizid, Levurozid (EN 13626, EN 13727; hohe Belastung)		0,5%		
Bakterizid, Levurozid (EN 16615; hohe Belastung)	0,5%			
Tuberkulozid (EN 14348; hohe Belastung)				5%
Mykobakterizid (EN 14348; inkl. M. terrae und M. avium; hohe Belastung)			2%	1%
Viruswirksamkeiten (EN14476)				
Begrenzt Viruzid Plus				4%
Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV, Influenzaviren; hohe Belastung)		3%	1%	
Adeno-, Noroviren (hohe Belastung)				4%
Rotaviren (ohne Belastung)			1%	
SV40 (hohe Belastung)				2%

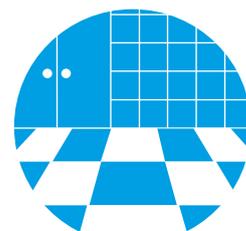

Zusammensetzung

In 100 g sind enthalten:
 2-Phenoxyethanol 2,0 g,
 Alkyl (C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 7,0 g,
 N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan
 1,3-diamin 5,0 g

Präparateeigenschaften

- alkoholfreies Konzentrat
- aldehydfrei
- Wirksamkeit:
 - bakterizid, levurozid wirksam
 - tuberkulozid wirksam
 - **begrenzt viruzid PLUS wirksam**
- hohe Materialverträglichkeit
- VAH gelistet

REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
00972+	2 L	6 Flaschen	16015185
00971+	5 L	2 Kanister	16015191
Zubehör (siehe Seite 155)			
Befüllbare Dosierflasche			
Kanisterpumpe zum Dosieren			
Kanisterhahn			
Kanisterschlüssel			